

г. Москва Карманицкий пер. д.5

Исх. 5

Дата. 16.12.2015

Настоящим письмом свидетельствуем Вам свое почтение и готовы предоставить отчет о результатах тестирования ультразвукового аппарата U50 производства компании EDAN  
По все вопросам вы можете связаться с нами по тел: +7 499 241 4978  
Надеемся на успешное и плодотворное сотрудничество.

Тестирование данного аппарата проходило на базе клиники ООО «АМК Медикал групп» врачом высшей квалификационной категории Гасиновой З.В.

При тестировании системы использовались конвексный, линейный и трансвагинальный датчики. Проведено исследование 15 пациентов. В ходе исследований врачами отмечались положительные характеристики данного УЗ аппарата:

- размер экрана достаточный, позволяющий рассмотреть мелкие детали изображения, хорошее антибликовое покрытие, не утомляющее глаза врача;
- очень удобно параллельно оценивать функциональное состояние органов и систем с помощью ЦДК, отмечена высокая чувствительность датчиков при измерении скоростей кровотока, с четким звуковым сопровождением тонов"
- Высокая четкость изображения, позволяющая четко визуализировать узлы и очаговые образования;

Мягкость изображения, нет выраженной контрастности, что по субъективному мнению принимающих в тестировании врачей, является достоинством данного аппарата; \* -

- Хорошая эргономика панели управления, позволяющая интуитивно просто выбирать необходимые функции и устанавливать параметры необходимые при проведении обследования пациента;

- Наличие двух портов позволяет проводить исследование непрерывно без прекращения обследования для замены датчика, что ускоряет процесс приема пациента.

Из отрицательных характеристик данного УЗ аппарата отмечено:

- громоздкий чемодан для транспортировки и достаточно высокий вес самого сканера ограничивает его сферу применения (при работе на выезде переносить такой аппарат от пациента к пациенту, для врача физически тяжело).

Считаем, что использовать данный аппарат можно в небольших амбулаториях для первичного приема пациента или для применения в ветеринарных лечебницах, где данный аппарат будет применяться наиболее эффективно.

С уважением,  
Ген. Директор ООО «АМК  
Медикал групп»

Шевченко И.А.

